



Etac  
Turner

Met zorg voor uw rug

 **etac**<sup>®</sup>

Creating Possibilities

Etac Turner is een praktisch hulpmiddel dat de gebruiker ondersteunt en activeert bij het overgaan van de ene naar de andere zittende positie. Het biedt zekerheid voor de persoon die wordt verplaatst zonder daarbij de hulpverlener zwaar te belasten.

### Gecontroleerde en veilige transfers

Turner vermindert het risico van vallen en het maakt het de verzorger mogelijk te werken in een ergonomisch juiste positie. Hiertoe hoeft alleen de hoogte van de handgreep en de kniesteun ingesteld te worden. Turner is makkelijk mee te nemen en neemt weinig ruimte in wanneer deze niet gebruikt wordt. Daarnaast is de Turner op elke ondergrond eenvoudig te vervoeren door de transportwielen. Turner mag alleen worden gebruikt voor personen die sterk genoeg zijn om met enige hulp zelfstandig kunnen staan.

### Veilig voor de gebruiker en licht en gemakkelijk voor de verzorger

Veel patiënten voelen zich onzeker tijdens transfers van bijvoorbeeld het bed naar de rolstoel. Verzorgers daarentegen staan vaak bloot aan hoge belastingen bij het assisteren bij deze transfers. Met Etac Turner voelen zowel gebruiker als verzorger zich zeker en op hun gemak.



#### Twee modellen

Etac Turner is leverbaar in twee modellen, met ovale of U-handgreep.



#### Verstelbare kniesteun

Een breed en zacht, licht gebogen kniekussen geeft steun en biedt comfort. Traploos in hoogte instelbaar met schaalverdeling.



#### Anti-slip bescherming

Voor een correcte, veilige positionering van de voeten bij het opstaan.



#### Transportwielen

De wielen worden alléén gebruikt bij transport van de Turner.



De verzorger pakt de handgreep met beide handen en zet één voet op de draaischijf.



De gebruiker pakt de handgreep aan de onderzijde en trekt zich hieraan omhoog. De verzorger gebruikt hierbij zijn eigen gewicht om de gebruiker hierbij in balans te houden.



De Turner wordt met de gebruiker gedraaid zodat deze in de juiste positie voor de stoel belandt. Met één voet op de draaischijf functioneert de verzorger vervolgens als contragewicht zodat de gebruiker veilig en gecontroleerd kan gaan zitten.

Omschrijving	Artikelnummer	Kleur	Wit
Turner Ovale handgreep	16090104	In overeenstemming met:	MDD 93/42/EEC EN 12182
Turner U-greep	16090105		
<b>Gewicht</b>			
Max gebruikersgewicht:	150 kg		
Eigen gewicht	12,8 kg		
<b>Afmetingen:</b>			
Hoogte U-handgreep :	82-123 cm		
Hoogte Ovale handgreep:	78-125 cm		
Diameter draaiplaat:	41 cm		
Hoogte voetplaat:	13 mm		
Beensteun breedte:	41 cm		
Beensteun hoogte:	15 cm		
Materiaal:	gepoedercoat staal		



Reinig het product met een oplosmiddelvrij schoonmaakmiddel (zuurgraad pH 6-9), of met een 70% oplossing met desinfectant. Kan ontsmet worden op max. 85°C.

**Etac Holland BV**  
Fluorietweg 16a  
1812RR Alkmaar, Nederland  
Telefoon +31 72 547 04 39  
Fax +31 72 540 13 05  
info.holland@etac.com  
www.etac-holland.com

**etac®**  
Creating Possibilities